




漫步者 辅听3号

说明书

下册
(产品操作)

www.edifier.com

产品说明及配件

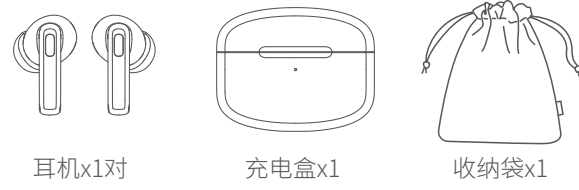

耳机x1对 充电盒x1 收纳袋x1



Type-C充电线x1 附赠耳套 x2对 说明书 x2

注意


- 辅听模式专为听力障碍者设计, 听力正常者不得使用。
- 不可完全取代医用助听器; 不建议有听力障碍的未成年人使用。
- 包装内配有不同尺寸耳套, 佩戴者请选择适合的耳套, 再辅听验配。
- 本说明书中的图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。

1

操作说明


开关机

- 充电盒开盖自动开机
- 将耳机放入充电盒, 关盖自动关机

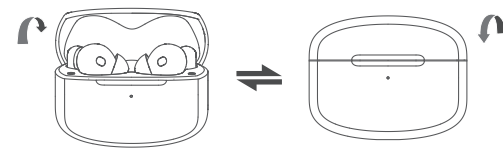

耳机充电

- 当耳机出现低电量提示音时, 将耳机放入充电盒, 关盖后即可充电。

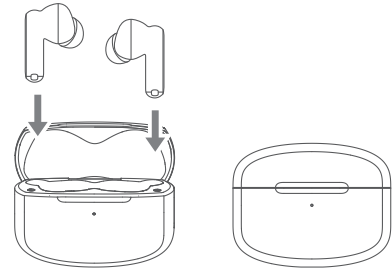

注意


耳机充电时, 请确保充电盒电量充足, 才可为耳机进行充电。

2

操作说明

充电盒充电


- 将充电盒接入 Type-C 充电线, 充电时指示灯常亮, 充满后指示灯熄灭

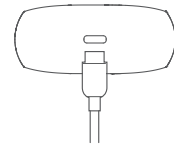

输入: 5V \approx 200mA(耳机)
5V \approx 1A(充电盒)


电量显示

- 打开充电盒上盖, 单击充电盒按键, 将显示充电盒电量
- 高电量 白灯亮
- 中电量 白绿灯亮
- 低电量 绿灯亮
- 电量低需充电 绿灯快闪 6 次后熄灭

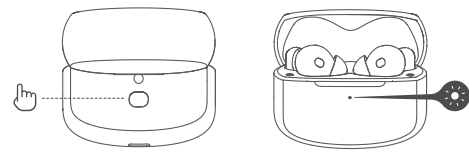

3

蓝牙连接

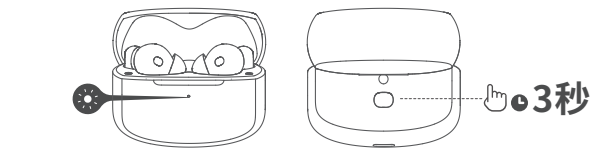

首次连接

- 充电盒开盖, 耳机开机后, 自动进入蓝牙配对状态, 白绿灯交替快闪
- 设备搜索“漫步者 辅听 3 号”选择连接
- 根据《漫步者辅听 3 号 说明书上册——辅听验配》, 完成辅听验配, 并导入验配数据至耳机
- 此时耳机辅听功能验配完成。保持手机蓝牙不关闭, 每次耳机开机机会自动连接手机蓝牙

连接其他设备


- 耳机均在充电盒内且开盖, 长按充电盒按键约 3 秒, 白绿灯交替快闪
- 设备搜索“漫步者 辅听 3 号”选择连接

注意

- 在验配完成导出数据至耳机后, 不连手机蓝牙也可使用辅听功能
- 在手机蓝牙功能保持常开的情况下, 耳机具有自动回连的功能
- 如果手机蓝牙关闭后再打开, 需重新操作耳机连接蓝牙

4


左右耳配对/恢复出厂设置

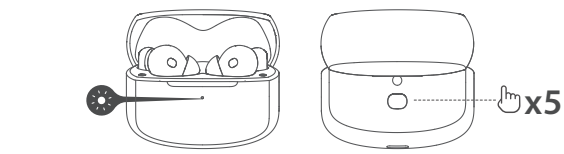

左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 五击充电盒按键白灯快闪, 进入左右耳配对, 同时将恢复耳机出厂设置
- 成功后耳机自动进入蓝牙配对, 白绿灯交替快闪

功能操作

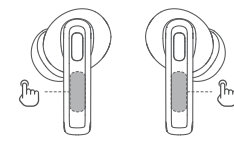

灰色区域为敲击区域

- 开启辅听 开机即开启
- 关闭辅听4秒 4击左/右耳
- 接听电话 双击左/右耳

注意

- 双击左右耳机, 仅可接听手机来电, 不可接听微信电话
- 恢复出厂设置后耳机内部存储的验配数据将被清零

5

漫步者辅听APP功能说明



注意

- 场景模式中, 有通用、室内、室外、嘈杂4种场景可选, 选定后耳机将记忆此场景。若需修改, 请在APP设置 中重新选择
- 找寻耳机的适用场景:
 - 找寻耳机: 适用于近距离查找; 在耳机与手机保持蓝牙连接的状态下, 可在辅听APP设置 页面点击“找寻耳机”功能, 耳机将发出声音帮助您找到耳机
 - 耳机位置: 适用于远距离查找; 在耳机与辅听APP有过连接记录的情况下, 可在APP“我的”页面点击“耳机位置”功能, 即可在地图中显示耳机一个月内最后一次连接手机的位置。

6

IB-100-FT0003-00 V1.0



扫码关注漫步者辅听



扫码下载漫步者辅听APP

北京爱德发科技有限公司 出品

地址: 北京市海淀区北四环西路68号 邮编: 100080

生产企业: 东莞市漫步者科技有限公司 邮编: 523808

地址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

型号: EDF800003

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

生产日期:

规格参数

产品型号: EDF800003 执行标准: Q/HDADF 0012
等效输入噪声级: ≤ 29 dB 谐波失真: $\leq 3\%$
最大输出声压级 (OSPL₉₀): 120dB
高频平均值 (OSPL₉₀): 115dB
满挡声增益: (高频平均值) 30dB
辅听工况频响范围: F1 ≤ 200 Hz F2 ≥ 6 KHz
蓝牙工况频响范围: 20Hz-20KHz
蓝牙版本: V5.3
充电时长: 约 1.5 小时
输入: 5V \approx 200mA(耳机) 5V \approx 1A(充电盒)
工作时长: 辅听模式: 耳机单次约 15h 复合约 52 小时
蓝牙模式: 耳机单次约 6h 复合约 21 小时

常见问题解答

充电时, 指示灯不亮。

- 请确保耳机电源连接正常。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。

耳机辅听效果不好。

- 请确保已通过漫步者辅听APP进行辅听验配, 并成功导入验配数据至耳机。
- 本产品专为中度与中重度听损人士设计, 若超出此范围, 辅听效果可能无法达到预期, 请选购其他类型产品。

7

产品中有害物质的名称及含量

有害物质名称	有害物质					
	多溴联苯 (PBBE)	多溴联苯 (PBB)	六价铬 (Cr(VI))	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)
部件名称						
金属部件						
塑料部件						
电线电缆						
电路板组件						
电接件						

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

8

安全注意事项

在使用和操作设备前, 请阅读并遵守下面的注意事项, 以确保设备性能最佳, 并避免出现危险或非法情况。

电子设备

- 有明文规定禁止使用无线设备的场所, 请勿使用本设备, 否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

对其它医疗设备的影响

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所, 请遵守该场所的规定, 并关闭设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作, 如起搏器、植入耳蜗等。若您使用了这些医疗设备, 请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 设备含有磁性材料, 关于是否影响可植入医疗设备的情况, 请咨询医生。
- 在使用本设备时, 请与植入的医疗设备(如起搏器、植入耳蜗等)保持至少15厘米的距离。

交通安全

- 谨记安全驾驶是您的首要职责, 请勿从事会分散注意力的活动。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。请联系制造商咨询详细信息。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统, 请遵守航空公司的相关规定, 在禁止使用无线设备的地方, 请勿使用该设备。

操作环境

- 请勿在多次、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用设备, 以免引起设备内部电路故障。
- 安放设备时, 请远离具有强磁场或强电场的电器, 如微波炉、电冰箱等。
- 请勿在雷雨天气使用本设备。雷雨天气可能会导致设备故障或电击危险。
- 建议在温度0°C+45°C范围内使用本设备。当环境温度低于+5°C时, 电池性能会受到限制。
- 请勿将设备放置在阳光直射的地方, 如汽车仪表盘或窗台处。
- 请勿将设备放置或靠近热源或裸露的火源, 如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其它可能产生高温的地方。
- 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或者扬声器附近, 以免金属物品附着, 对您造成伤害。

配件要求

- 只能使用设备制造厂商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其它类型配件, 可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定, 并可能导致安全事故。如需获取认可的配件, 请与制造商联系。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源(如UL、CSA、VDE、CCC), 否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

9

安全注意事项

电池安全

- 请勿拆解或改装电池, 插入异物、或浸入水或其它液体中, 以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。电池只能由制造商更换。
- 请勿跌落、挤压或刺穿电池, 避免让电池遭受外部大的压力, 从而导致电池内部短路和过热。

- 电池浸入水后禁止使用。在极低气压下, 电池可能会爆炸或泄露等。如果电池出现膨胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常, 请勿继续使用, 应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

维护和保养

- 锂电池的产品若长时间不使用, 请至少确保每三个月充一次电。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮, 否则可能导致火灾或触电危险。
- 清洁和维护前, 请停止使用本设备, 关闭所有应用, 并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用腐蚀性化学品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡(例如银行卡、电话卡等)长期接触本设备, 否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件, 否则可能导致设备故障、着火或爆炸。

注意

- 听力出现障碍应就医, 在治疗无效的情况下, 才考虑使用辅听设备。
- 急性外耳道炎、鼓膜炎、慢性化脓性中耳炎(处于流脓感染期)、急性化脓性中耳炎、对本产品材料过敏者不适合佩戴本产品。
- 使用过程中如觉得耳朵不适, 请立即停止使用。
- 本产品不是玩具, 14岁以下儿童请勿接触。
- 为避免意外吞食造成危险, 耳机及其配件的存放请远离儿童和宠物。
- 耳机中含有锂电池, 如不慎吞咽, 会对人体产生严重的伤害, 需立即就医。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会导致火灾或人员受伤的风险。
- 无论本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员修理或联系制造商, 其内部没有用户可更换的部件。
- 不得将设备投入火中或置于高温中, 置于火中或温度超过100°C的环境中会导致爆炸。

环境保护

- 请勿将本设备及其配件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本设备及其配件处理的本地法令, 并支持回收行动。

10

服务条例

感谢您选购漫步者耳机, 为维护您的权益, 本公司提供如下的售后服务:

- 咨询服务: 用户在使用过程中遇到任何问题, 均可致电: 400-810-5526 咨询或登录: www.edifier.com 查询。

- 维修服务: 我司维修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换(注: 在外观无损, 配件齐全前提下), 一年保修的服务; 当地若无售后服务中心, 用户可直接找厂家进行售后服务, 具体情况请致电: 400-810-5526, 在得到厂家客服确认并受理后, 请将售后品寄往厂家售后部门。注: 请务必先致电客服确认受理。

- 若有以下原因造成的耳机损坏, 恕不提供维修服务:
 - 非正常使用: 使耳机头带、麦克风线折断, 信号线断裂, 耳壳破裂。
 - 不当存储: 如耳机长时间暴露在高温、高湿、高压、强电磁场等环境中, 使扬声器、麦克风、电池快速老化、受损的。
 - 未经本公司授权的维修。
 - 请勿擅自拆卸或改装设备及其配件, 否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

- 保修卡所记载内容与产品不符, 恕不提供维修服务。
- 耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划伤不属于保修之范围。
- 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证, 请勿自行修改保修卡及购机凭证, 否则将被视为作废。
- 使用本产品前, 请仔细阅读本产品的使用说明。
- 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

- 售后收件电话: 0769-88986868
- 售后收件地址: 东莞松山湖工业东路2号漫步者返修组

11

保修卡

保修卡填写内容

产品名称	盖章处
产品型号	
购机日期	
用户名称	
用户地址	
联系电话	
维修人	
故障描述	

12