



漫步者辅听

漫步者 辅听3号

说明书

上册

(辅听验配)

www.edifier.com

1 下载漫步者辅听APP



用手机扫描二维码
下载漫步者辅听APP
进行辅听验配、观看辅听3号视频教程

▲ 注意：APP升级后,实际呈现可能略有不同

2 首次连接手机



白绿灯交替闪烁

首次配对,充电盒开盖耳机自动开机后,
自动进入蓝牙配对状态,白绿灯交替快闪

2 首次连接手机



打开手机蓝牙,连接耳机
“漫步者 辅听3号”

3 辅听验配操作说明



打开“漫步者 辅听”APP,进行辅听验配
快速验配、专业验配二选一即可,建议快速验配
点击屏幕按钮,开始辅听验配

4 快捷验配操作说明



戴上耳机,听到“滴”声后,按V;听不到时,按X

4 快捷验配操作说明



输入佩戴者姓名后点击“保存并导出”
即可完成辅听验配

封面

5 专业验配操作说明



佩戴耳机,点击屏幕“专业验配”,依次上下滑动调节各个
频点的刻度值,直到佩戴者刚好听不到耳机发出的声音
▲ 注意:为了达到最优效果,必须保证左右耳
共计12个频点都进行了验配

5 专业验配操作说明



辅听验配完成后,
请点击屏幕底部“完成”按钮

5 专业验配操作说明



输入佩戴者姓名后点击“保存”会生成听阈图
▲ 注意:可在首页“我的验配”中查看佩
戴者保存过的历史数据

5 专业验配操作说明



点击下方“导出”按钮,系统将根据验配结果,
生成听力补偿数据并自动导入耳机,以保证
佩戴者能听到更清晰的声音

6 再次连接其它手机



长按3秒

白绿灯交替闪烁

若需要连接其他手机,请将耳机放入充电盒内且开盖,
长按充电盒按键约3秒,直至指示灯白绿灯交替闪烁,
耳机将进入蓝牙配对状态

6 再次连接其它手机



打开其他手机蓝牙,连接耳机“漫步者 辅听3号”
即可完成